


|   |    |
|---|----|
| STRUTTURA DELLA PIATTAFORMA SIDLY                                   | 2  |
| • <u>Come creare un account Amministratore</u>                      | 3  |
| • <u>Amministratore: Come creare l'account per il Caregiver</u>     | 4  |
| • <u>Amministratore: Come creare l'account per l'Utente</u>         | 6  |
| • <u>Amministratore: Accesso elenco utenti</u>                      | 8  |
| • Amministratore: Assegnazione di un utente ad un CareGiver         | 9  |
| • Amministratore: Creazione di un beacon per localizzazione interna | 12 |
| • Amministratore: La funzione Beacon                                | 13 |
| • Amministratore : Storia degli Utente                              | 14 |
| • <u>Amministratore : Cambio Password</u>                           | 15 |
| • <u>Amministratore: Cruscotto Utenti</u>                           | 16 |
| • <u>Lista Utenti</u>   | 17 |
| • Dettagli dell'utente  | 18 |
| • <u>Caregiver</u> :Gestione allarmi                                | 29 |

# Struttura della piattaforma SiDLY

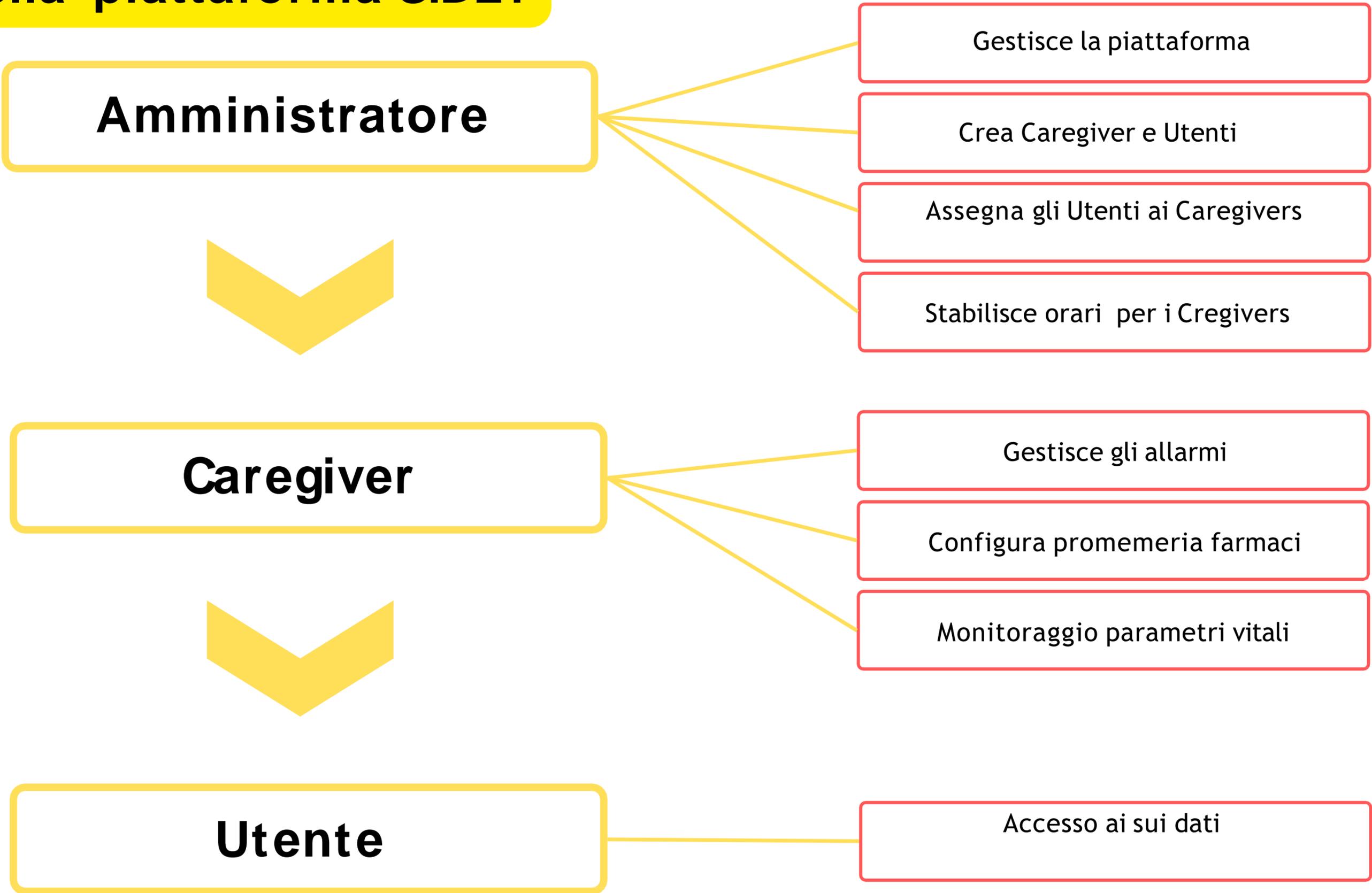

# Come creare un account Amministratore

ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA <https://sidly-platform.com/>

The screenshot shows the registration page of the Sidly platform. At the top left is the 'SIDLY' logo. At the top right are links for 'Accesso' and 'Registrazione', and a language selection dropdown menu currently set to Italian. The main form is titled 'Registrazione' and contains the following fields: 'E-mail', 'Nome', 'Cognome', 'Password', and 'Ripeti la password'. Below these are optional fields for 'IMEI del braccialetto (0/15)', 'Nome della ditta (facoltativo)', 'Codice fiscale (facoltativo)', and 'Codice PREMIUM (facoltativo)'. At the bottom, there are two checkboxes for accepting terms and privacy policy, followed by a green 'Registrazione' button. Yellow boxes and arrows highlight specific parts of the form: the language menu, the main registration fields, the IMEI field, and the privacy policy checkboxes.

Scegliere la lingua cliccando sulla bandierina

Inserire le informazioni per la registrazione dell'Amministratore


Inserire numero IMEI del braccialetto

Accettare i termini sulla privacy

# Amministratore: Come creare l'account per il Caregiver



Premere Aggiungi

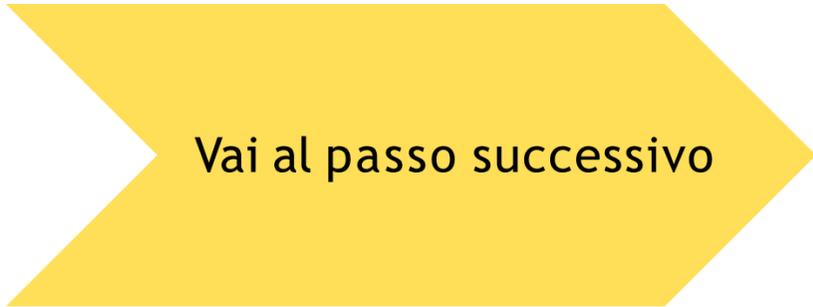

# Amministratore: Come creare l'account per il Caregiver


The screenshot shows a web interface for adding a caregiver. On the left is a dark sidebar with a user profile (NZA V. PORCELLI-RP, Manager) and navigation icons. The main content area has a '← Torna' button and a form titled 'Aggiungi operatore sanitario'. The form contains the following fields:

- Nome \***: A text input field.
- Cognome \***: A text input field.
- Telefono**: A text input field with a dropdown menu showing '+39' and a small Italian flag icon.
- Email \***: A text input field highlighted with a yellow border. A yellow callout box with the text 'e-mail del caregiver' and an arrow points to this field.
- Data di nascita**: A date picker input field.


**Completare le informazioni per il Caregiver nella scheda includendo la sua e-mail , che verrà utilizzata per l'accesso alla piattaforma . Per attivare l'account attendere di ricevere la mail dal sistema con la Password provvisoria . Una volta ricevuta cliccare sul link per accedere e cambiare la Password .**

# Amministratore: Come creare l'account per l'Utente


Selezionare  
Utente

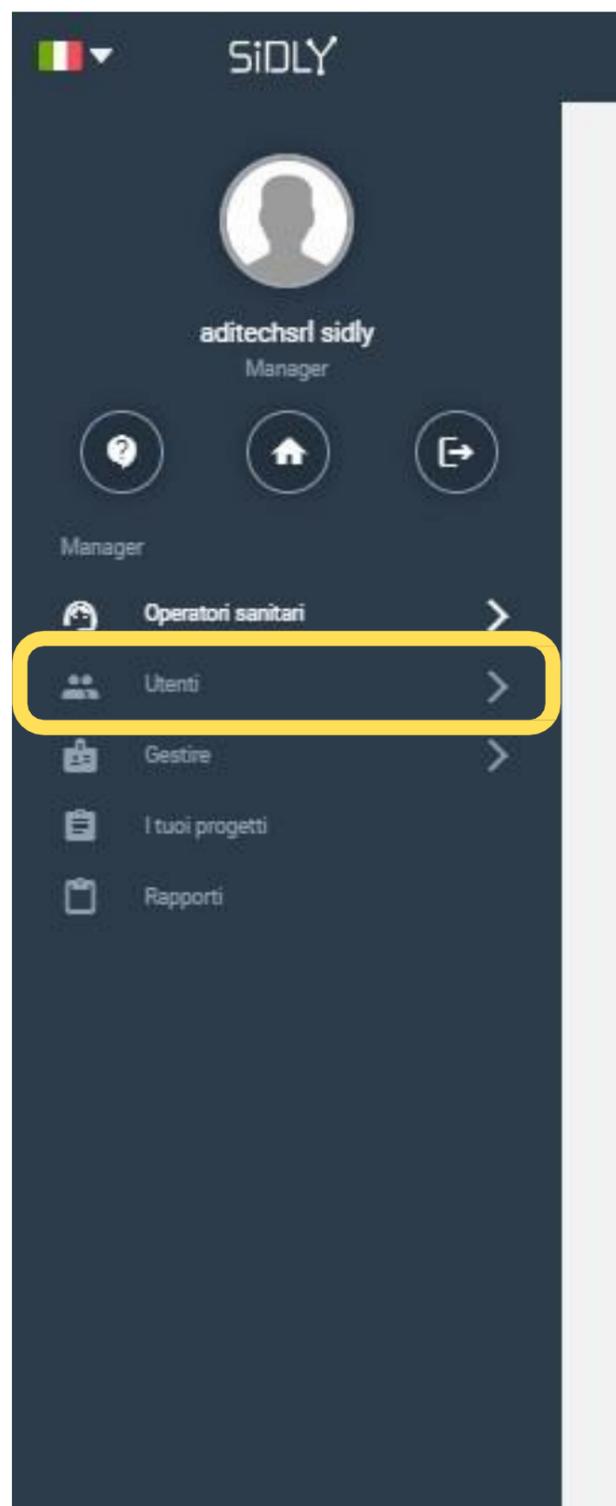

Selezionare  
Aggiungi

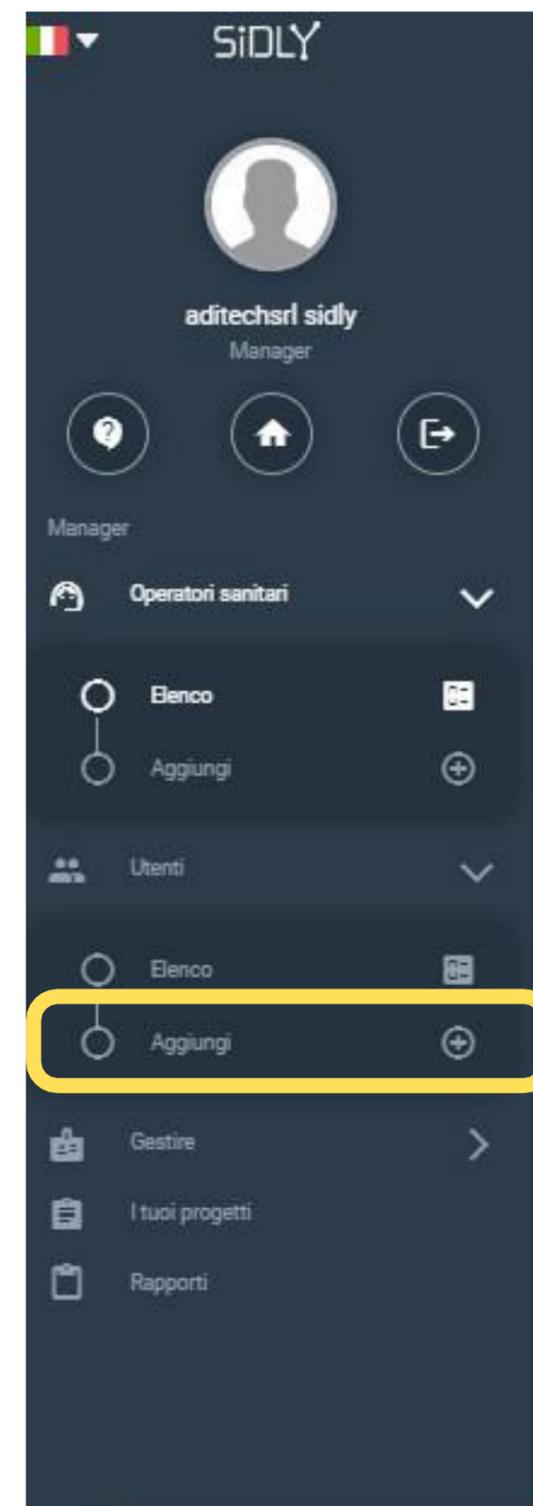

# Amministratore: Come creare l'account per l'Utente

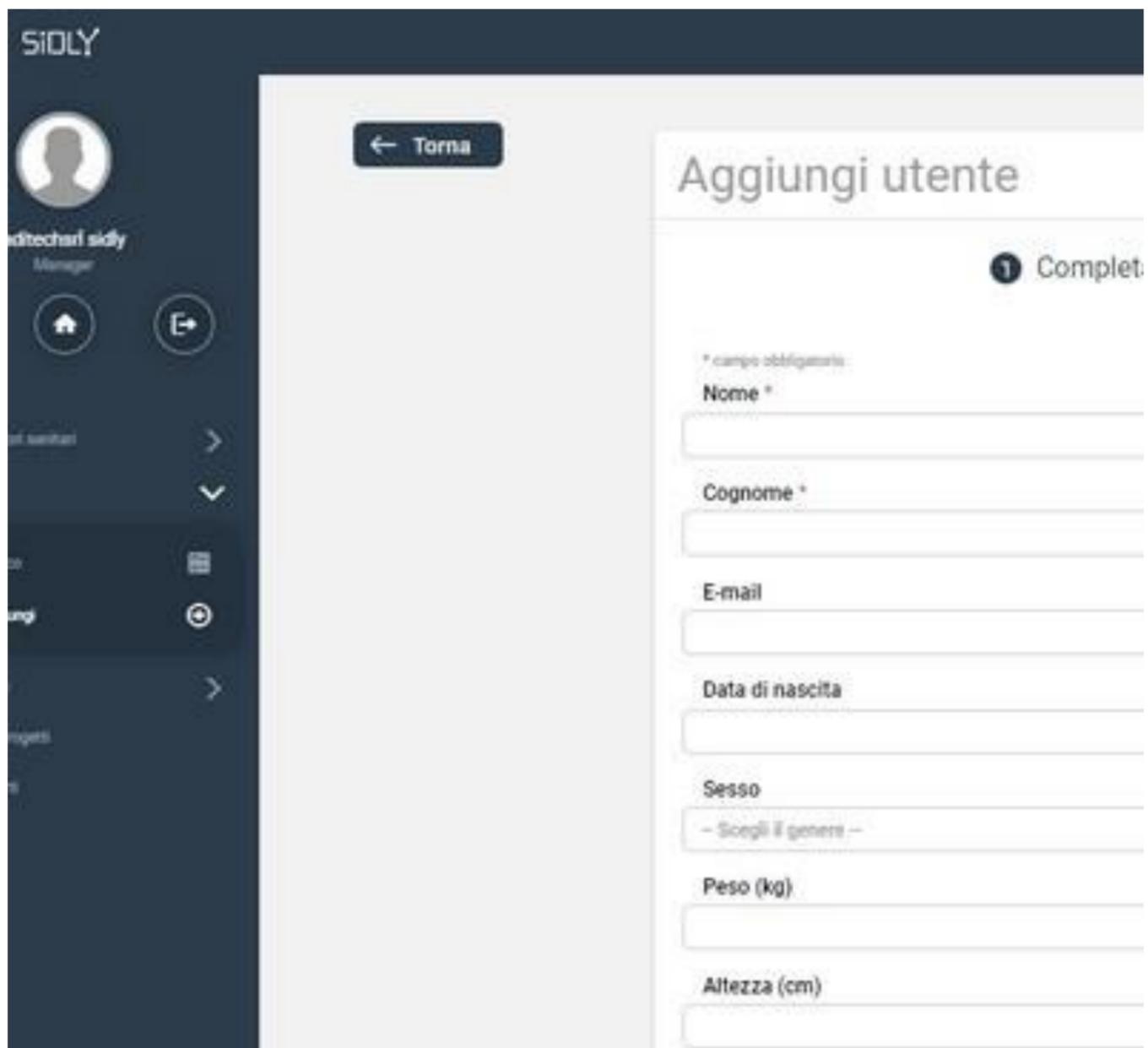

The screenshot shows the 'Aggiungi utente' (Add user) form in the SIDLY admin interface. The form is titled 'Aggiungi utente' and includes a 'Torna' (Back) button. The form fields are:

- Nome \*
- Cognome \*
- E-mail
- Data di nascita
- Sesso (Scegli il genere)
- Peso (kg)
- Altezza (cm)

A progress indicator shows '1 Completato' (1 Completed).



The screenshot shows the 'Configurazione del braccialetto' (Wearable configuration) form in the SIDLY admin interface. The form is titled 'Configurazione del braccialetto' and includes a 'Torna' (Back) button. The form fields are:

- Numero IMEI del braccialetto (0/15)

A progress indicator shows '1 Completato i dati dell'utente' (1 Completed user data) and '2 Configurazione del braccialetto' (2 Wearable configuration). A 'Controlla' (Check) button is visible at the bottom right.

- 1) Inserire i dati anagrafici dell'utente
- 2) Inserire il numero IMEI \* del bracciale assegnato all'utente.

\*Il numero si trova sul dorso del bracciale o sulla etichetta della confezione

Completare la scheda anagrafica con i dati dell'utente

# Amministratore: Accesso elenco utenti


Dopo aver creato gli utenti , selezionando dal menu " elenco" si accede alla lista completa dei sinottici degli utenti con indicazioni dell'ultimo accesso, stato braccialetto, livello del campo e della batteria

The screenshot displays the SIDLY administrative interface for user management. On the left is a dark sidebar with navigation icons. The main content area features a search bar at the top right with the text "Aggiungi utente". Below the search bar are three filter toggles: "Care" (checked), "Care indossato" (unchecked), and "Care non è indossato" (unchecked). The user list consists of six cards, each representing a user and their associated device. The first card is highlighted with yellow callouts. The callout "Nome del braccialetto" points to the device name "aditech sidly pro 8566". The callout "Ultimo accesso" points to the timestamp "2020-11-11 10:34". The callout "Stato del braccialetto" points to the status "indossato" (worn), which is displayed in green text. Each card also shows the battery level and the device status (e.g., "non attivo").

| Nome del braccialetto  | Ultimo accesso   | Stato del braccialetto | Stato della batteria |
|------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| aditech sidly pro 8566 | 2020-11-11 10:34 | indossato              | 88%                  |
| aditech sidlycare 0260 | 2020-09-21 10:22 | non attivo             | 52%                  |
| aditech sidly 2 9892   | 2020-09-21 14:07 | non attivo             | 79%                  |
| aditech sidly 2 8376   | 2020-09-21 12:06 | non attivo             | 48%                  |
| aditech sidly 2 9637   | 2020-09-18 14:53 | non attivo             | 41%                  |
| aditech sidlycare 1683 | 2020-09-18 16:40 | non attivo             | 62%                  |

# Amministratore: Assegnazione di un utente ad un CareGiver

Dall'elenco dei CareGivers

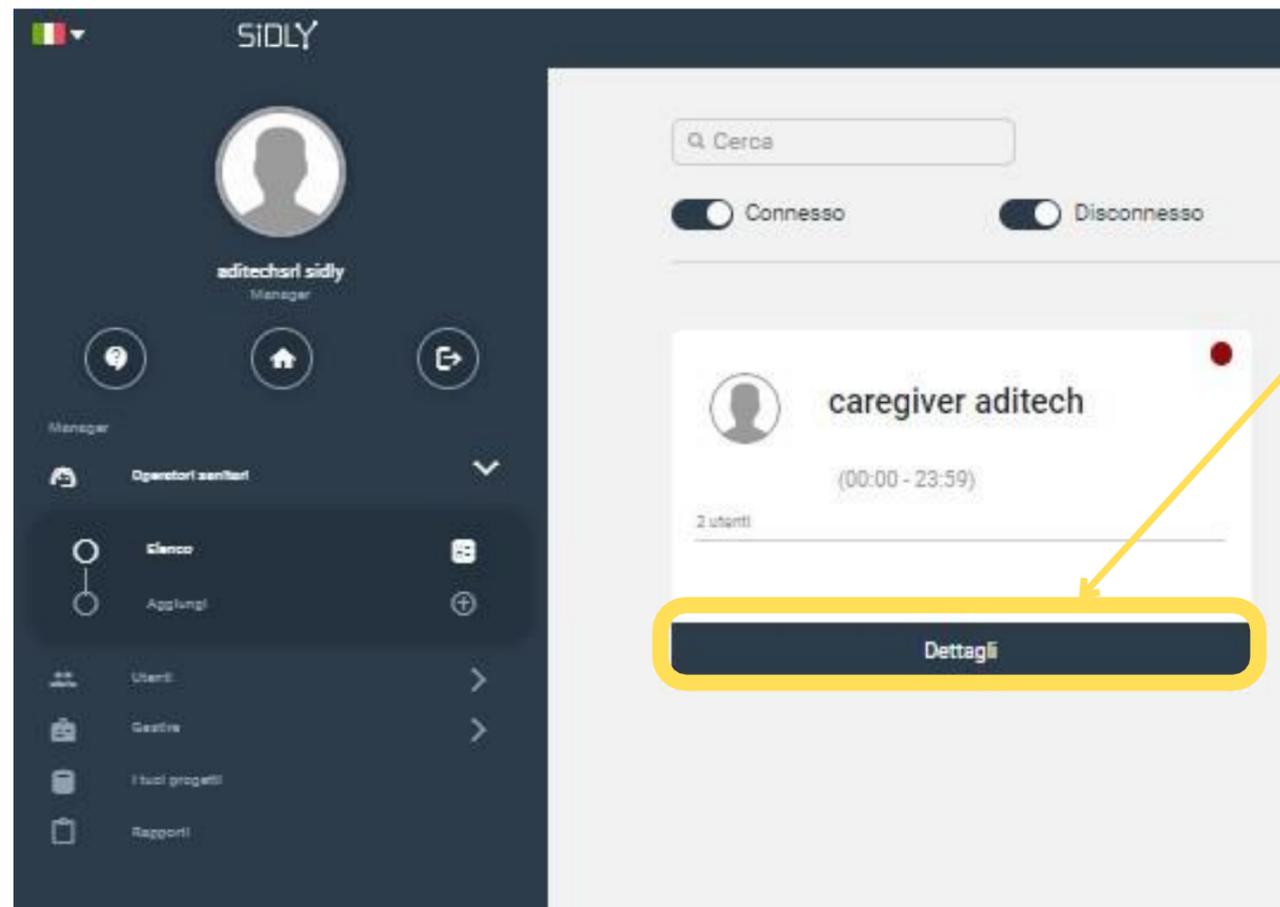


1) Selezionare il CareGiver  
2) Premere dettagli per aprire la pagina del CareGiver



3) Selezionare Aggiungi Utente

# Amministratore: Assegnazione di un utente ad un CareGiver

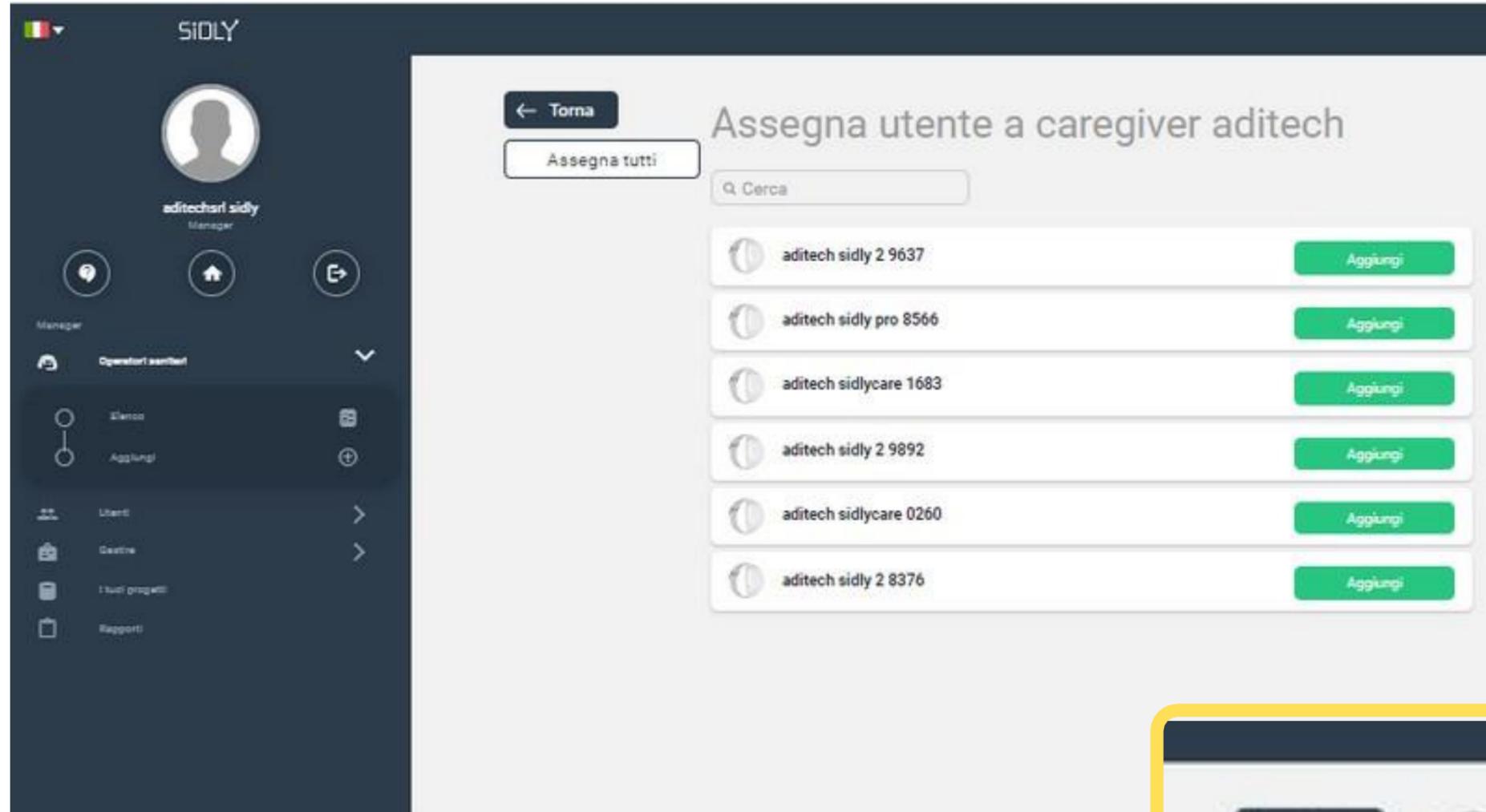

4) Selezionare un utente e premere aggiungi

5) L'utente comparirà nella pagina del CareGiver




# Amministratore: Assegnazione di un utente ad un CareGiver



6) Cliccare su orario per impostare i tempi del servizio di assistenza del Caregiver

7) muovere il cursore per stabilire gli orari in cui il CareGiver riceverà gli allarmi

8) premere Salva

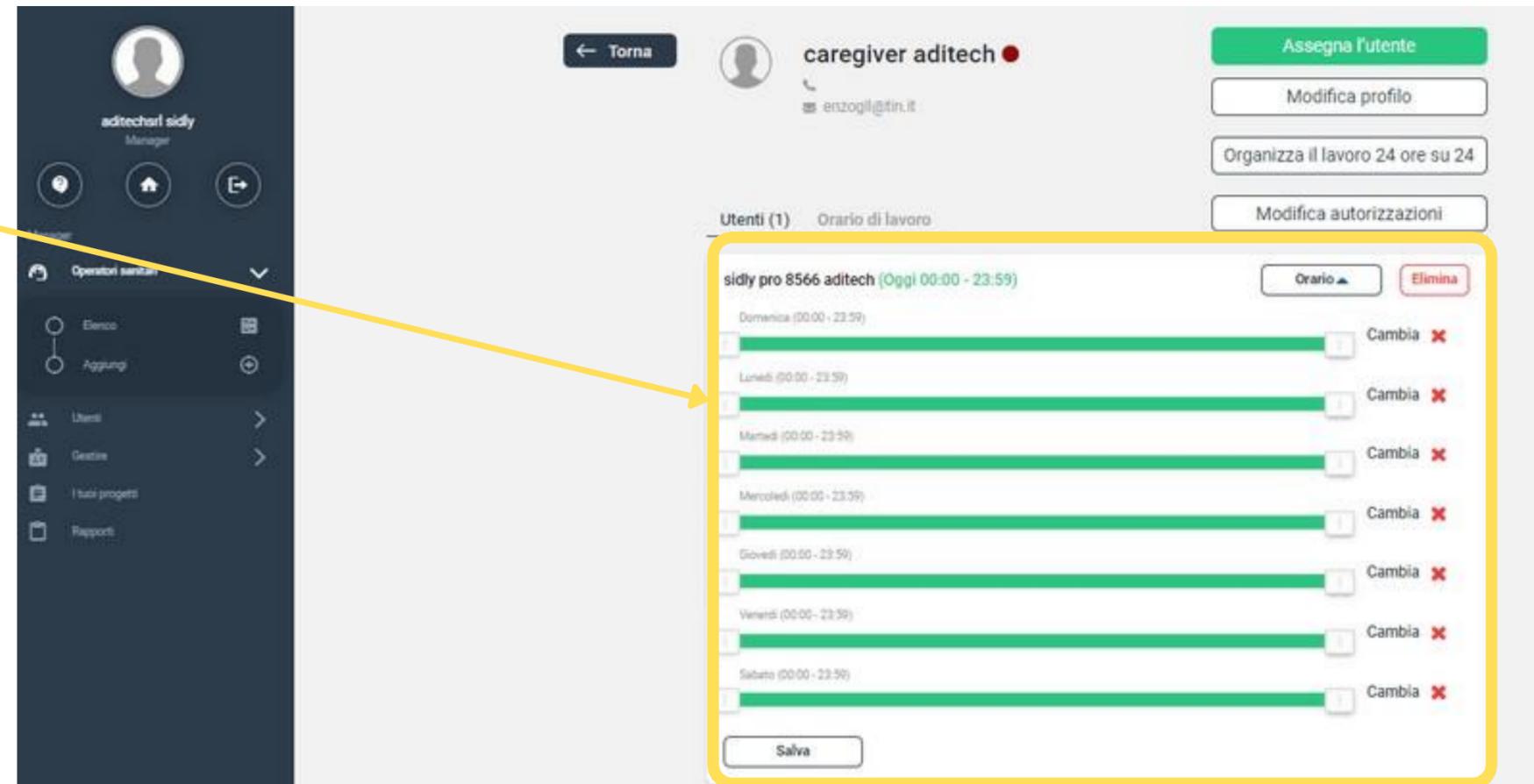


# Amministratore: Creazione di un beacon per localizzazione interna

## Descrizione

I Beacon sono dei piccoli ripetitori Wi-Fi che possono essere utilizzati per la localizzazione indoor o quando il GPS non è visibile.  
Sono gestiti dall'account dell'Amministratore

1) Selezionare My Beacon dall'elenco **Gestire**

2) premere Aggiungi Beacon

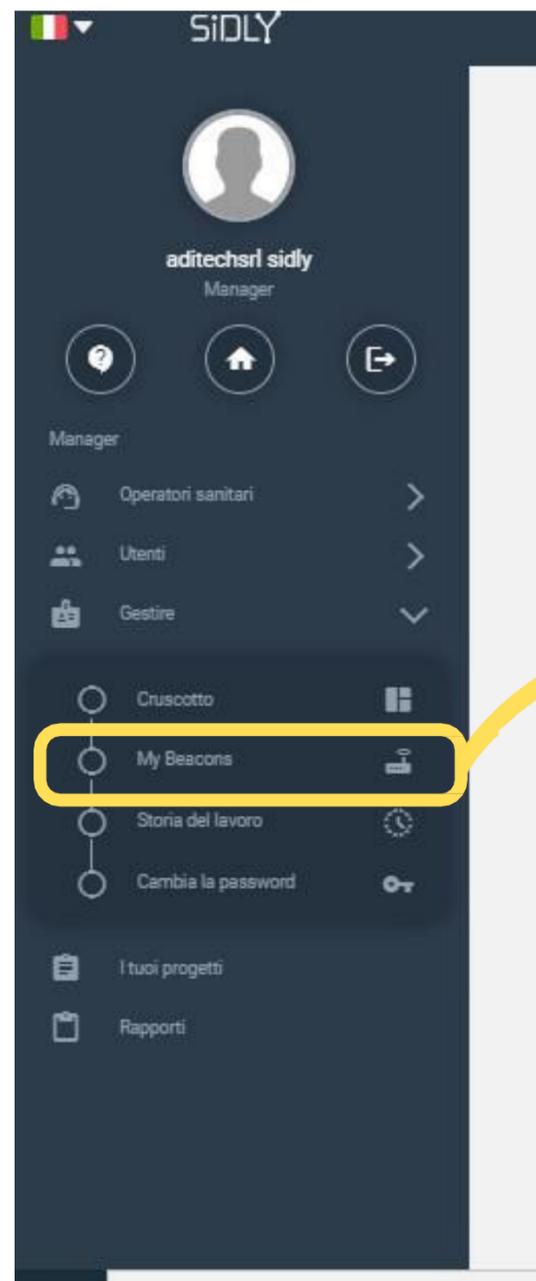

# Amministratore: La funzione Beacon

The screenshot shows a web form titled "Aggiunta di un beacon" (Add a beacon). It includes a "Torna" (Back) button in the top left. The form has several fields: "Nome" (Name), "Indirizzo MAC", "Indirizzo" (Address), and a map. A green "Aggiungi" (Add) button is at the bottom right. Yellow callout boxes with arrows point to each of these elements, providing instructions in Italian.

Inserire Nome

Inserire il MAC address del ripetitore

Inserire l'indirizzo del beacon

Salvare

Nel caso di SOS o caduta il bracciale invierà un allarme con il nome del beacon di riferimento.

Nel caso l'utente esce dall'area del beacon verrà inviata un messaggio al CareGiver

# Amministratore: Storia degli Utente


E' possibile visionare lo storico degli Utenti ed esportare un report

The screenshot shows a web interface for user history. On the right side, there is a button labeled "esportare in Excel" which is highlighted by a yellow callout box with the text "Stampa report" and an arrow pointing to the button. Below the button is a table with three columns: "Nome e cognome", "Condividere", and "Data". The table contains 12 rows of user activity logs. At the bottom of the table, there is a pagination control showing "1" as the current page and "162" as the total number of pages.

| Nome e cognome    | Condividere  | Data                |
|-------------------|--|---------------------|
| aditech srl sidly | L'utente ha modificato un utente con un numero IMEI 867717032028566            | 2022-11-11 12:00:22 |
| aditech srl sidly | L'utente ha effettuato l'accesso al browser web                                | 2022-11-11 10:04:55 |
| aditech srl sidly | L'utente si è disconnesso  | 2022-11-10 16:04:43 |
| aditech srl sidly | L'utente ha effettuato l'accesso al browser web                                | 2022-11-10 12:59:22 |
| aditech srl sidly | L'utente si è disconnesso  | 2022-11-10 12:39:37 |
| aditech srl sidly | L'utente ha cancellato un utente esistente con un numero IMEI 868298060605640  | 2022-11-10 12:39:13 |
| aditech srl sidly | L'utente ha effettuato l'accesso al browser web                                | 2022-11-10 12:38:04 |
| aditech caregiver | L'utente si è disconnesso  | 2022-11-10 12:35:00 |
| aditech caregiver | L'utente ha ricevuto un allarme dall'utente con il numero IMEI 867717032028566 | 2022-11-10 12:32:41 |
| aditech caregiver | L'utente ha ricevuto un allarme dall'utente con il numero IMEI 867717032028566 | 2022-11-10 12:32:41 |

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 162 »

# Amministratore: Cambio Password

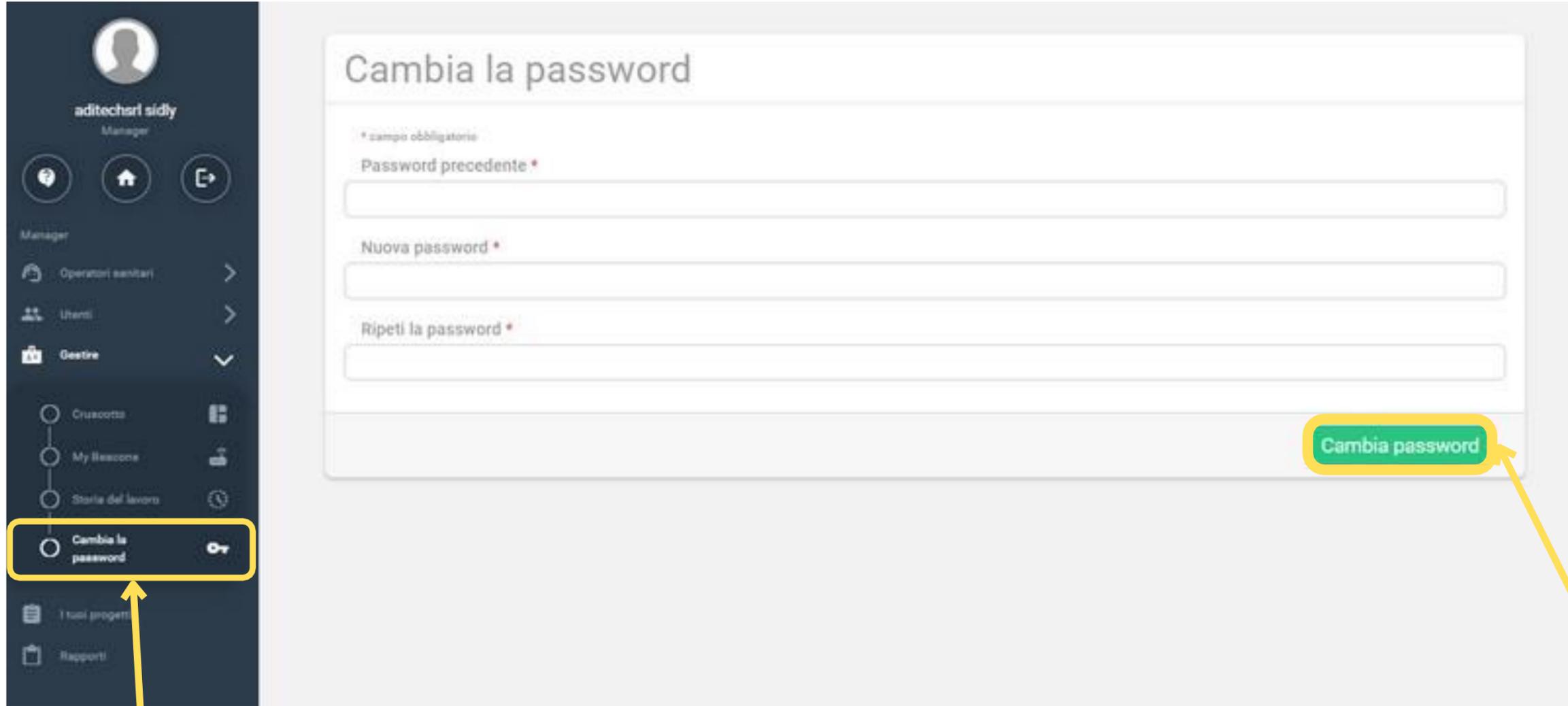


Seleziona : **Cambia password**

Conferma **Cambio password**

# Amministratore: Cruscotto Utenti

Premere Cruscotto per accedere alla lista degli eventi

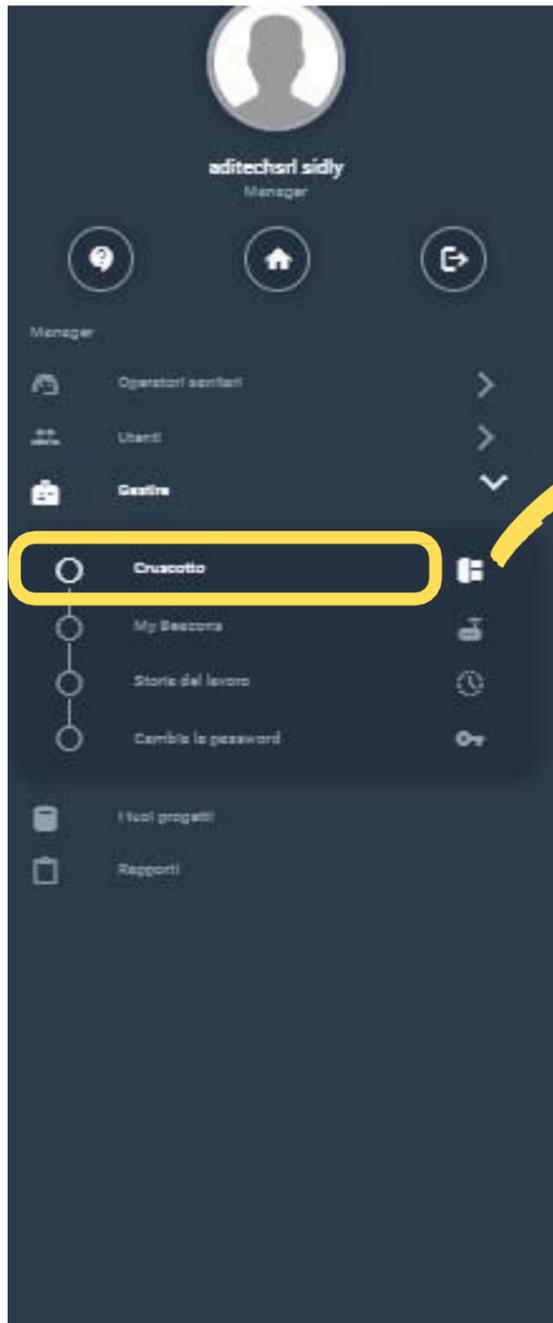

Premere l'evento per evidenziare i dettagli


The 'Le mie notifiche' page features a filter panel on the left and a list of notifications on the right. The filter panel includes a 'Zoom notifiche' button, a 'Cancella filtri' button, a date selector, and two sections of checkboxes: 'Parametri' (with options like Caduta, SOS, Frequenza Cardiaca, Batteria, Braccialetto indossato, Perimetro virtuale) and 'Per l'utente' (with options for various user IDs). The notification list contains items such as 'Perimetro virtuale', 'Braccialetto indossato', 'SOS ALARM E' stato premuto l'SOS', 'Braccialetto indossato', 'Batteria carica', and 'Braccialetto rimosso'. A yellow box highlights the filter panel, and a yellow arrow points from the 'Cruscotto' menu item to this panel.

Utilizzare i filtri per evidenziare il tipo di evento

A detailed view of a notification for 'Lee Cunningham'. It includes a profile picture, the name 'Lee Cunningham', the IMEI number 'IMEI: 767857033990705', a pulse icon and the text 'Pulse overhead', and the timestamp '330 day ago 2021-12-02 20:54'. A yellow box highlights this entire notification card.

# Lista Utenti

Il cruscotto dell'utente contiene tutte le informazioni sullo stato dell'utente

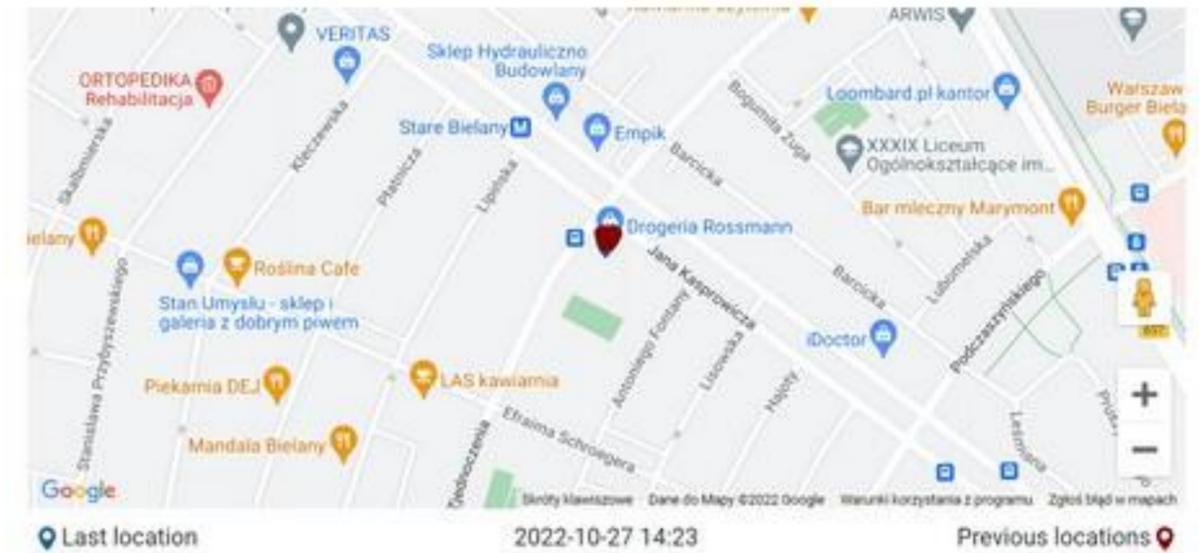

Premere per vedere l'ultima posizione sulla mappa

Modello bracciale

Potenza del segnale ricevuto dal bracciale

Premere per aggiungere una nota



Ultimo collegamento con la piattaforma

- Indossato** : il bracciale è indossato
- In carica** : il bracciale è sulla basetta di carica
- Inattivo** : il bracciale non è acceso
- Rimosso** : il bracciale è acceso ma non indossato

Premere per vedere i dettagli dell'utente

# Dettagli dell'utente

← Torna

Generale Farmaci Notifiche **Rapporti**

Venerdì, 11 Novembre 2022, ora 14:15

Intervallo di tempo: **Ultimo giorno** 📅

 **aditech sidly pro 8566**

Configura  
Cambia imei

Modello: CARE

IMEI del braccialetto: 867717032028566

Ultima misura: 2022-11-11 13:39

Stato della batteria: **75 %**

Perimetro virtuale:

Ultima caduta rilevata: 2022-11-10 10:30

Ultimo SOS: 2022-11-11 12:00

Dettagli utente ▾

Operatori sanitari:

- aditechsr sidly (00:00 - 00:00) ●
- aditech caregiver (00:00 - 23:59) ●

Notifiche Rapporti

Intervallo di tempo: **Ultimo giorno** 📅

- Ultimo giorno
- Ultima settimana
- Ultimo mese
- Ultimo anno
- Tutto

Operatori sanitari:

- aditechsr sidly (00:00 - 00:00) ●
- aditech caregiver (00:00 - 23:59) ●

per selezionare l'intervallo di tempo di osservazione dal menù a tendina

Livello Batteria

Ultima caduta

Ultimo SOS

 Rimosso

 Indossato


Stato presenza CareGivers

# Dettagli dell'utente

## Parametri



Parametri fisiologici

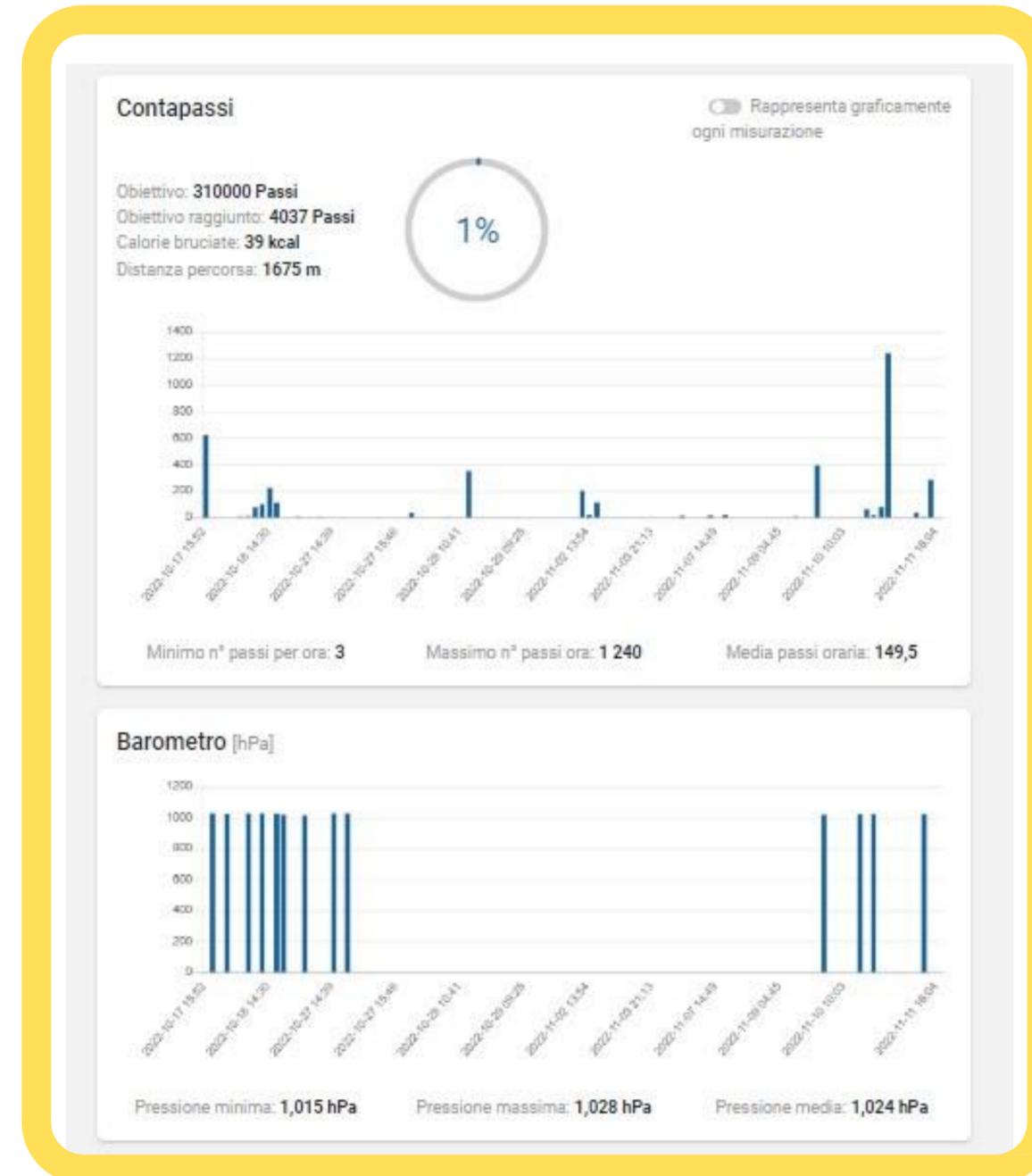

Parametri attività e ambientali

# Dettagli dell'utente

## Parametri

### Misure

| Data             | Frequenza cardiaca [b/min] | Passi | Saturazione [% SpO2] |
|------------------|----------------------------|-------|----------------------|
| 2022-11-11 18:04 | --                         | --    | --                   |
| 2022-11-11 12:00 | --                         | 23    | --                   |
| 2022-11-10 10:30 | --                         | 61    | --                   |
| 2022-11-10 10:06 | --                         | --    | --                   |
| 2022-11-10 09:59 | --                         | --    | --                   |
| 2022-11-09 15:34 | --                         | --    | --                   |
| 2022-11-09 15:01 | --                         | 293   | --                   |
| 2022-11-09 13:18 | 57                         | --    | --                   |
| 2022-11-09 09:23 | --                         | 8     | --                   |
| 2022-11-07 16:23 | 49                         | --    | 98                   |

< 1 2 3 4 >

Lista ultime misurazioni

### USER.LAST-NOTIFS

| genere          | Data             | Servito |
|-----------------|------------------|---------|
| SOS             | 2022-11-11 18:04 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 18:03 |         |
| Band not worn   | 2022-11-11 16:38 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 15:30 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 15:18 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 13:39 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 13:36 |         |
| Zona di Allarme | 2022-11-11 13:33 |         |
| Band worn       | 2022-11-11 13:04 |         |
| SOS             | 2022-11-11 12:00 |         |

Lista ultime notifiche

# Dettagli dell'utente

## Promemoria medicine

[Torna](#)

Generale **Farmaci** Notifiche Rapporti

aditech sidly pro 8566, Giovedì, 17 Novembre 2022, ora 14:37

**Farmaci**

| Nome | Orario | Descrizione |
|------|--------|-------------|
|------|--------|-------------|

[Aggiungi farmaco](#)

aditech sidly pro 8566, Aggiungi un farmaco

Nome

Descrizione

Orario somministrazione  
00:00

[Aggiungi orario](#)

[Aggiungi farmaco](#)

Premere per aggiungere nuovi farmaci

Inserire nome del farmaco e orario e salvare per attivare il promemoria. L'utente sentirà un messaggio vocale all'ora prefissata

# Dettagli dell'utente


## Allarmi

aditech sidly pro 8566, Giovedì, 17 Novembre 2022, ora 14:47

### SOS

| Data evento      | Localizzazione        | Frequenza cardiaca [1/min] | Descrizione         | Gestito da        |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 2022-11-11 18:04 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Nessuna descrizione | Nessun operatore  |
| 2022-11-11 12:00 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Nessuna descrizione | Nessun operatore  |
| 2022-11-10 10:06 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-10 09:59 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-09 15:34 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-09 15:01 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-09 09:23 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-07 16:12 | <a href="#">Mappa</a> | 56                         | Descrizione         | aditech caregiver |
| 2022-11-03 13:15 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      |                     |                   |
| 2022-11-02 17:52 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      |                     |                   |

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 11

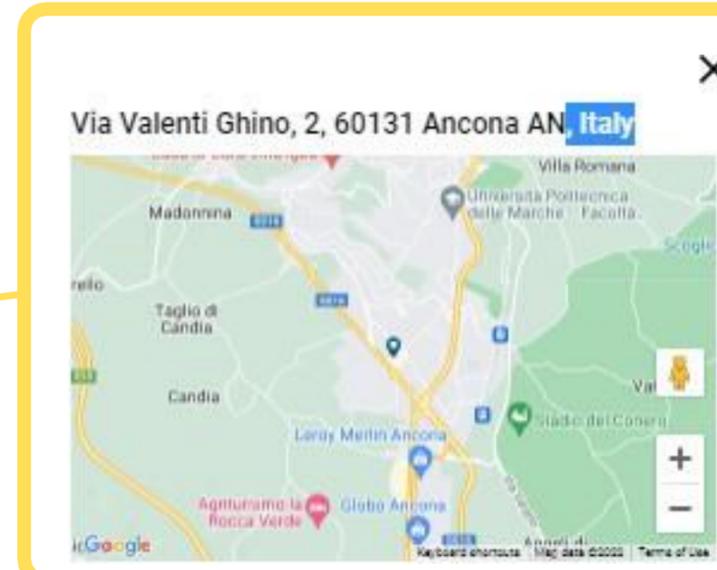

Premendo su mappa viene mostrato la posizione in cui è avvenuto l'allarme

### Caduta

| Data             | Localizzazione        | Frequenza cardiaca [1/min] | Descrizione | Gestito da        |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|
| 2022-11-10 10:30 | <a href="#">Mappa</a> | -----                      | Descrizione | aditech caregiver |
| 2022-10-27 18:02 | <a href="#">Mappa</a> | 57                         | Descrizione | aditech caregiver |

< 1 >

### Perimetro virtuale

| Data             | Localizzazione        | Descrizione         | Gestito da       |
|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| 2022-11-11 18:03 | <a href="#">Mappa</a> | Nessuna descrizione | Nessun operatore |
| 2022-11-11 15:30 | <a href="#">Mappa</a> | Nessuna descrizione | Nessun operatore |
| 2022-11-11 15:18 | <a href="#">Mappa</a> | Nessuna descrizione | Nessun operatore |

E' possibile vedere l'elenco di tutti gli eventi

# Dettagli dell'utente

## Reports

oma Generale Farmaci Notifiche **Rapporti**

aditech sidly pro 8566, Giovedì, 17 Novembre 2022, ora 14:53

**Rapporto** Genera report

Periodo 

Farmaci

Notifiche

Misurazione della frequenza cardiaca

Saturazione

Contapassi

Barometro

Nota

E' possibile generare un report selezionando le date ed i parametri

From:  
2022-10-12 

To:  
2022-10-13 

Save

| Received date and time | Measurements |
|------------------------|--------------|
| 04-10-2022 00:39       | 0            |
| 03-10-2022 22:39       | 0            |
| 03-10-2022 20:39       | 0            |
| 03-10-2022 18:39       | 0            |
| 03-10-2022 16:39       | 0            |
| 03-10-2022 14:39       | 0            |
| 03-10-2022 12:41       | 69           |
| 03-10-2022 12:30       | 63           |
| 03-10-2022 12:29       | 0            |
| 03-10-2022 12:25       | 67           |

# Dettagli dell'utente

## Configurazione della pagina utente

aditech sidly pro 8566

Elimina utente

Dati dell'utente Configura il braccialetto Dettagli utente Notifica SMS Sensori

\* campo obbligatorio

Nome \*

sidly pro 8566

Cognome \*

aditech

E-mail

Data di nascita

Sesso

-- Scegli il genere --

Peso (kg)

90

Altezza (cm)

100

Numero di telefono

+39

Indirizzo

Nota

Premere per cancellare l'utente

Premere per cambiare funzione

**ATTENZIONE**

Peso: almeno 2 cifre (e.g. 72)

Altezza: almeno 3 cifre (e.g. 178)

Telefono: almeno 4 cifre

# Dettagli dell'utente

## Configurazione del bracciale

aditech sidly pro 8566

Dati dell'utente   Configura il braccialetto   Dettagli utente   Notifica SMS   Sensori

Opzioni generali ▾

Numero IMEI del braccialetto  
867717022028566

Fuso orario  
Europe/Rome

Contatto di emergenza   Ripeti il telefono di emergenza

+39 3347180256   3347180256

Aggiungi un altro numero

Lingua per il braccialetto  
Italiano

Opzioni avanzate ▾

Torna

Inserire il numero che sarà avvisato in caso di allarme.  
Si possono inserire fino a 3 numeri

Selezionare la lingua del bracciale. I messaggi vocali  
saranno emessi nella lingua selezionata

# Dettagli dell'utente

## Configurazione del bracciale

Opzioni avanzate

**Frequenza delle misurazioni automatiche**  
Regola ogni quanto tempo il bracciale effettua le misurazioni automatiche. Ricorda che minore è la frequenza delle misurazioni, maggiore è l'autonomia del dispositivo.

3 h 55 min

**Sensibilità del rilevatore di caduta**  
Imposta la sensibilità di rilevamento delle cadute del bracciale. L'impostazione del valore su 5 può causare falsi allarmi quando viene rilevata una caduta.

3

**Perimetro virtuale**  
Impostare questa opzione comporterà l'invio di notifiche al Caregiver quando il bracciale lascia la zona di allarme selezionata.

Imposta il Perimetro virtuale

Premere per accedere alla configurazione area perimetro virtuale

aditech sidly pro 8566

**Indirizzo**  
Per impostare il perimetro virtuale, inserire l'indirizzo che è il centro della zona e quindi selezionare la voce dall'elenco che appare sotto il campo di immissione.

Via Armando Diaz, 195, 63900 Fermo FM, Italy

**Estensione della zona**  
Dopo aver selezionato l'indirizzo corretto, impostare il raggio del perimetro virtuale

610 m

**Frequenza delle misure di zona**  
Per completare la configurazione, impostare il tempo che interviene tra due controlli consecutivi.  
ATTENZIONE: quando la funzione perimetro virtuale è attivata, i controlli vengono eseguiti anche durante l'esecuzione di misurazioni automatiche

0 h 15 min

Torna

Elimina il perimetro virtuale

Salva

Dalla sessione Opzioni avanzate è possibile:

- 1) fissare la frequenza delle misurazioni da 15min a 4h. Maggiore è la frequenza selezionata minore è la durata della batteria
- 2) selezionare la sensibilità del sensore di caduta in base alle abitudini e alla conformazione dell'utente. Sensibilità "1" nessuna caduta viene rilevata, sensibilità "5" aumenta la probabilità di falsi allarmi
- 3) creare un perimetro virtuale oltre il quale viene emesso un allarme

**ATTENZIONE**

questa misurazione può compromettere l'autonomia del bracciale

# Dettagli dell'utente

## Pagina utente

 aditech sidly pro 8566

[Dati dell'utente](#) [Configura il braccialetto](#) [Dettagli utente](#) [Notifica SMS](#) [Sensori](#)

### Contatti

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <input type="text"/> | Referente 1 ▾ |
| <input type="text"/> | Referente 2 ▾ |
| <input type="text"/> | Referente 3 ▾ |

### Patologie/Protesi

- Alzheimer
- Iperensione
- Parkinson
- Asma/BPOC
- Diabete
- Epilessia
- Cardiopatico
- Tiroide
- Apparecchio acustico
- Aritmia
- Pacemaker

Altre patologie:

**ATTENZIONE**

La pagina utente deve essere compilata in modo accurato per consentire al Caregiver in caso di bisogno di avere tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'utente

# Dettagli dell'utente

## Configurazione notifiche

aditech sidly pro 8566 Elimina utente

[Dati dell'utente](#) [Configura il braccialeto](#) [Dettagli utente](#) [Notifica SMS](#) [Sensori](#)

Informazioni SMS su:  
(seleziona le informazioni che verranno inviate via SMS ai numeri di emergenza)

SOS  
Quando questa opzione è abilitata, dopo aver premuto il pulsante SOS sul braccialeto, verrà inviato un SMS ai numeri di emergenza.

Caduta  
Se abiliti questa opzione, ogni volta che il braccialeto rileva una caduta, invierà un SMS ai numeri di emergenza.

Braccialeto rimosso  
Abilitare questa opzione significa che quando la banda NFC rileva l'assunzione per urtare, verrà inviato un SMS ai numeri di emergenza. Ricorda che aumentando il numero di SMS inviati, riduci il numero di SMS nel tuo pecco e accorci la durata della batteria della banda.

Braccialeto indossato  
Abilitando questa opzione, verrà inviato un messaggio SMS al Carigiorno quando il braccialeto è indossato per più di 10 ore. Ricorda che aumentando il numero di SMS da inviare, si riduce la quantità di SMS disponibili nel proprio pacchetto di abbonamento e si riduce l'autonomia del braccialeto.

Batteria carica  
Abilitando questa opzione, quando la banda avrà completamente carica, verrà inviato un SMS ai numeri di emergenza. Ricorda che aumentando il numero di SMS inviati, riduci il numero di SMS nel tuo pecco e accorci la durata della batteria del telefono.

Batteria scarica  
L'abilitazione di questa opzione invierà messaggi SMS ai numeri di emergenza quando il livello della batteria è inferiore al 10%. Ricorda che aumentando il numero di SMS inviati, riduci il numero di SMS nel tuo pecco e accorci la durata della batteria della banda.

Uscita dal perimetro virtuale  
L'abilitazione di questa opzione comporterà l'invio di messaggi SMS ai numeri di emergenza quando la banda supera la zona di allarme definita. Ricorda che aumentando il numero di SMS inviati, riduci il numero di SMS nel tuo pecco e accorci la durata della batteria della banda.



Includi nome e cognome utente  
Se questa opzione è abilitata, il nome e cognome dell'utente verranno aggiunti a ciascun SMS.

Torna Salva

Configurare le notifiche che si vuole inviare ai numeri telefonici di emergenza

# CareGiver: Gestione Allarmi SOS

La notifica di un allarme sul cruscotto del Caregiver si presenta con un Popup rosso ed un allarme sonoro

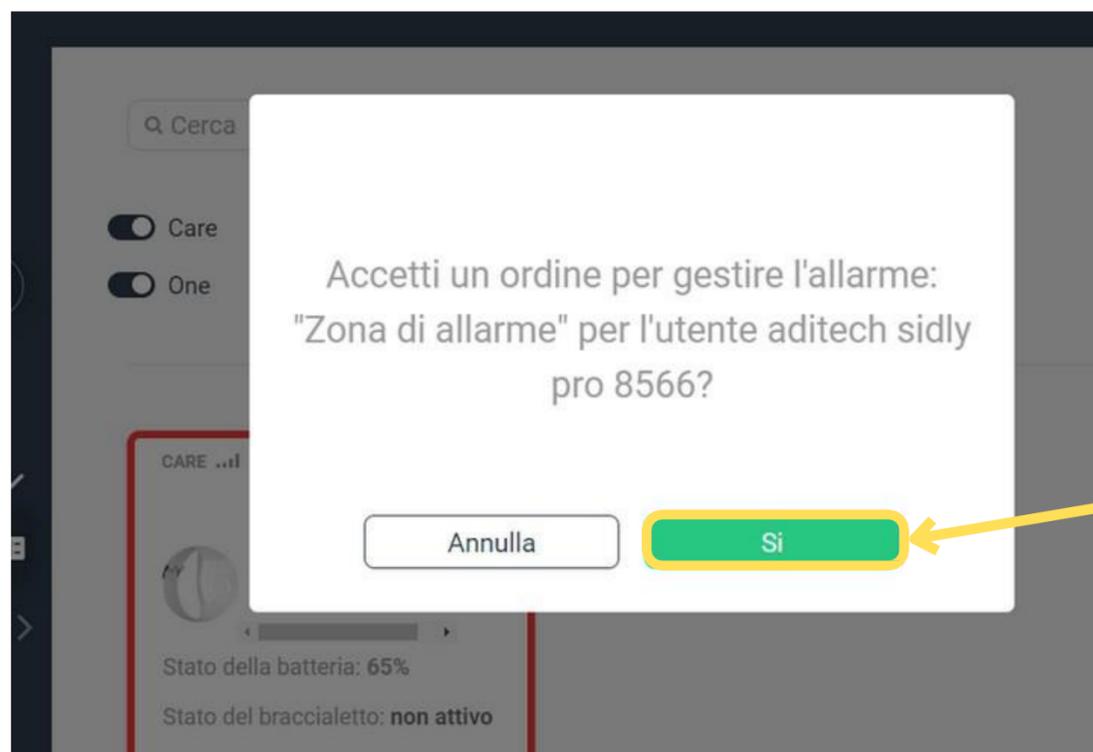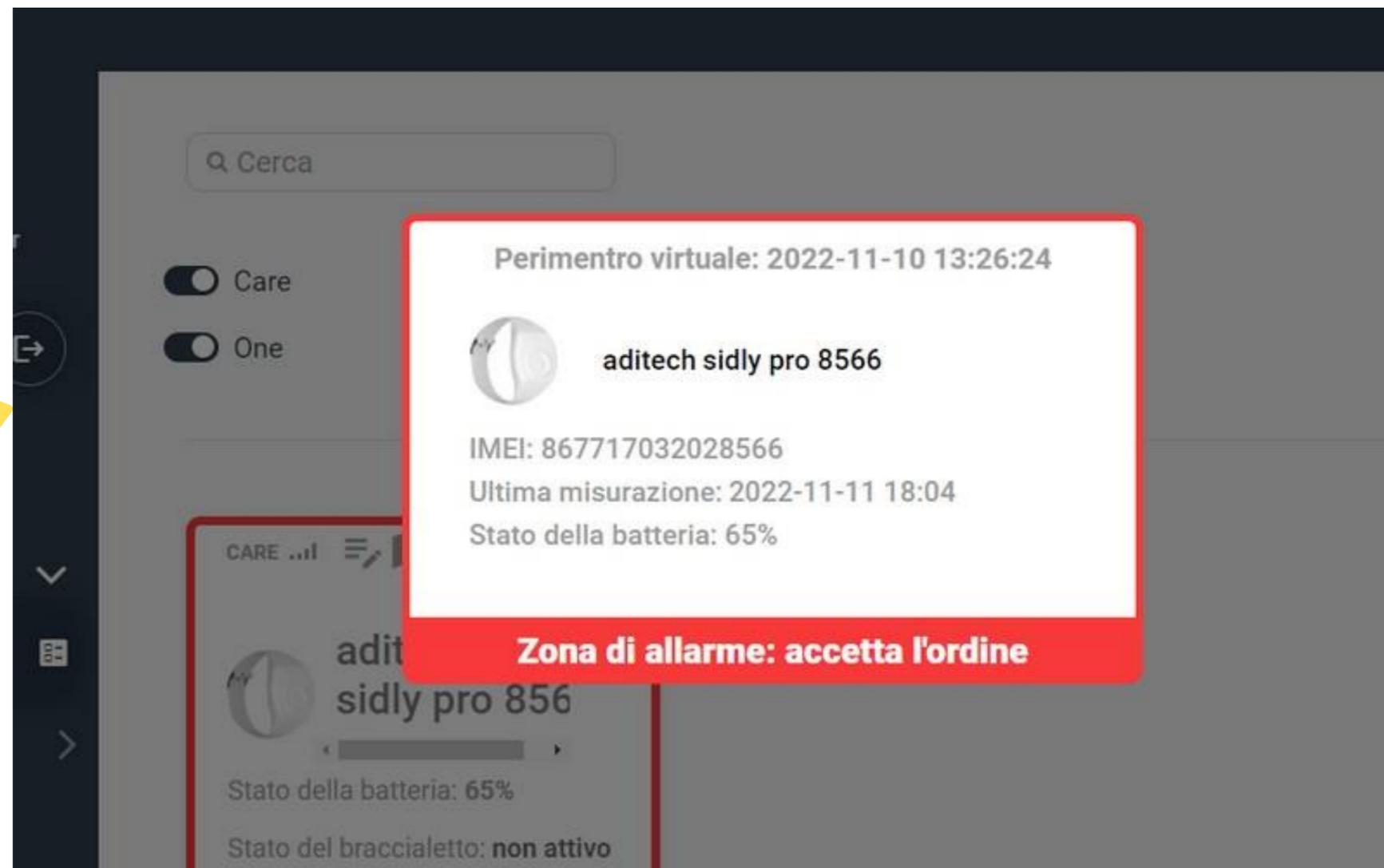

Premere SI per gestire l'allarme

# CareGiver: Gestione Allarmi SOS

Premere per vedere i dati dell'utente

Compilare i campi per la gestione dell'evento dell'utente

Perimetro virtuale : 2022-11-10 13:26:24

 **aditech sidly pro 8566**

IMEI: 867717032028566  
Ultima misura: 2022-11-11 18:04  
Stato della batteria: 65%

**Ordinare la zona di allarme**

Tempo di reazione: 10279m 49s

Informazioni sull'utente

Storia del paziente

Hai ancora 12 allarmi non gestiti

Tipo di allarme

Test  Falso

Rational - notifica della rete di supporto  Tecnico

Rational - chiamata di servizi di emergenza  Formazio

Descrizione della richiesta :

Richiesta intervento: